


# Pedikűrös csikó használati útmutató

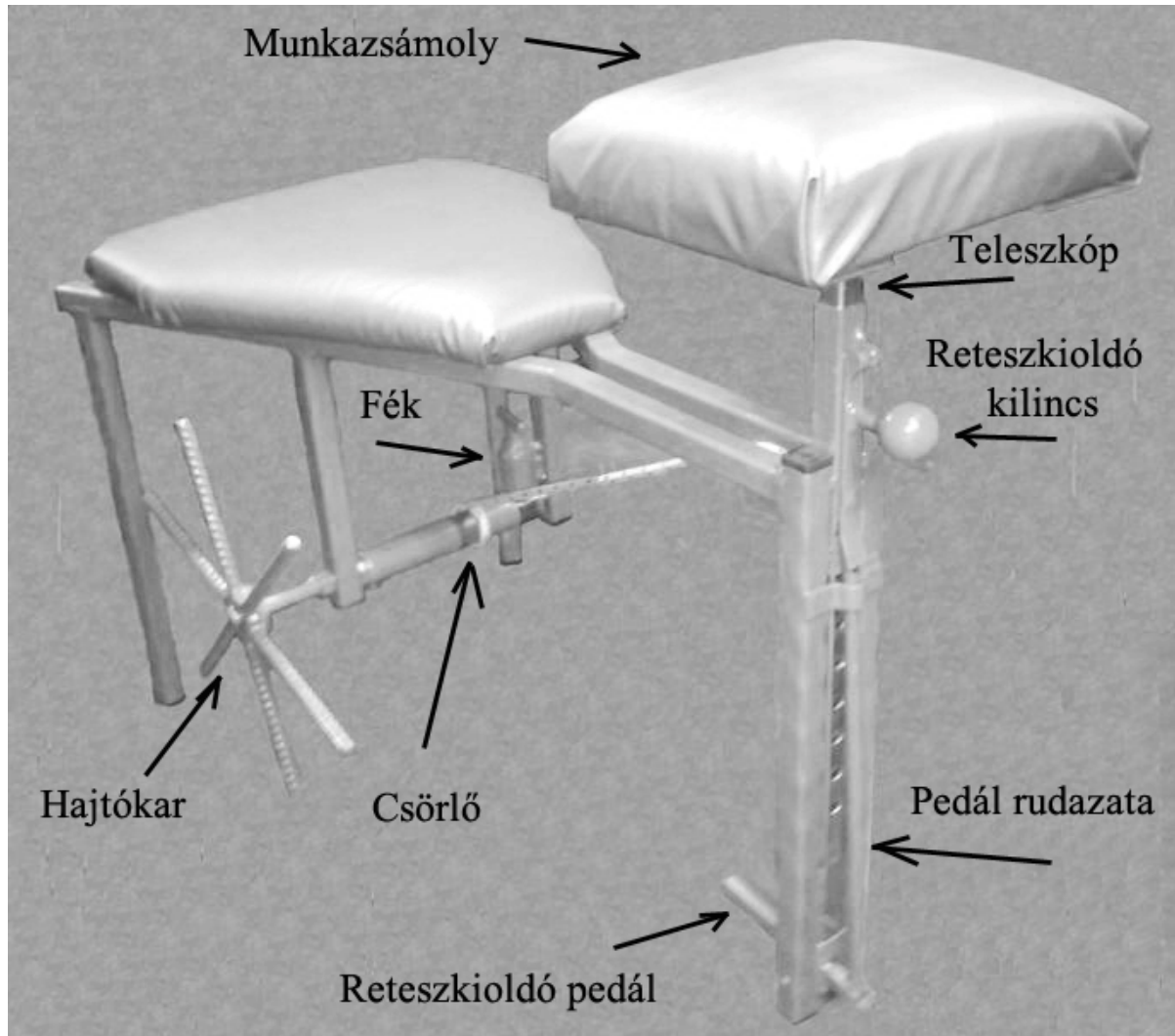

Ez a pedikűrös "csikó" lehetővé teszi használójának, hogy egy túlsúlyos ember lábát is a kívánt magasságba emelje erőfeszítés nélkül.




A hajtókar segítségével a felhúzó kötélt a csörlőre tekeredik, az pedig a teleszkópot emeli, ezzel a munkaszámolyt. A retesz a teleszkópra fűrt lukakba csúszik, ezzel rögzítve azt. A retesz kiképzése ék alakú, ezért az emelésnél racsniként működik. Emelés közben 2 cm-es fokozatokkal lehet rögzíteni a számolyt, ha abbahagyjuk az emelést, a pozícióhoz legközelebbi lyukba csúszik a retesz.



Süllyesztéskor nem racsnizik, vagy a kilincset kell megemelni, vagy a pedált lenyomni, és a hatókarral kell kontrollálni a leengedést. Ha leért a kívánt pozícióba, elengedjük a kilincset vagy lelépünk a pedálról, a retesz rögzíti a teleszkópot.

A fék arra való, hogy a hajtókar elengedése után ne szaladjon le a kötélt lendületből. A szorítócsavar egy parafatömböt szorít a csörlő tengelyére, a kívánt és beállított erővel.

Fontos!

Leengedéskor MINDIG tartsuk a kezünket a hajtókaron, mert a fék a teher súlyát nem fékezi le, csak a lendületből történő letekeredést gátolja meg!

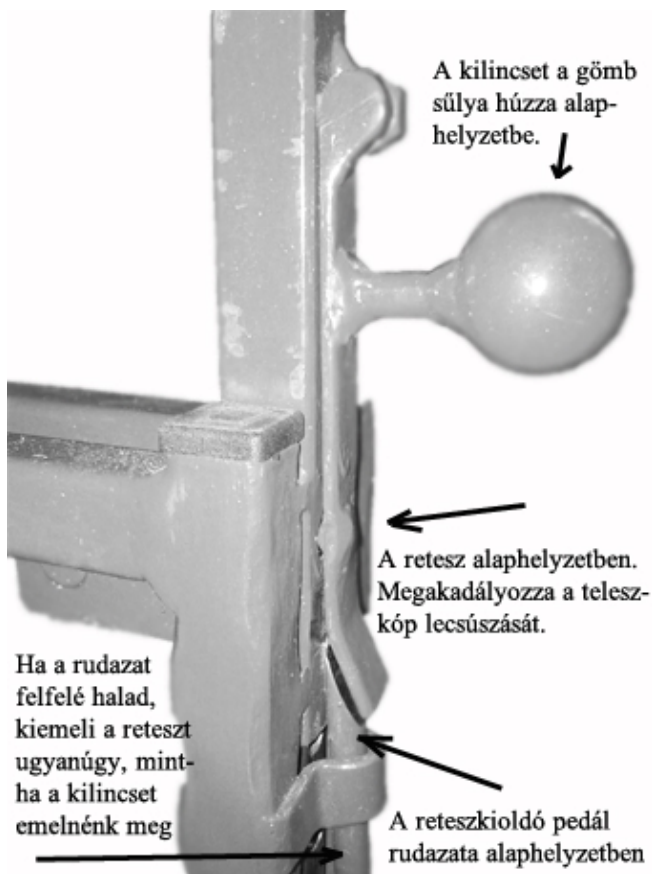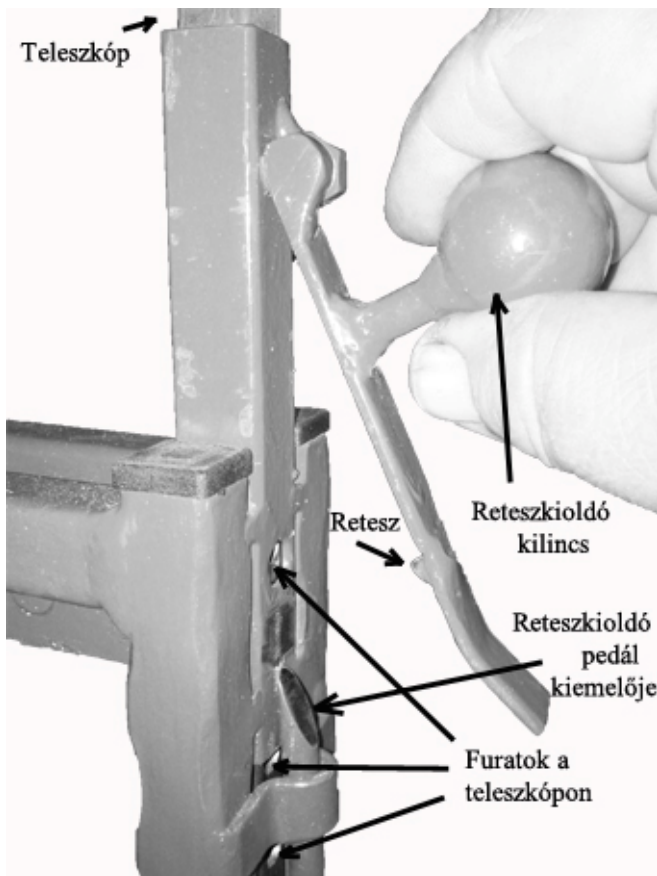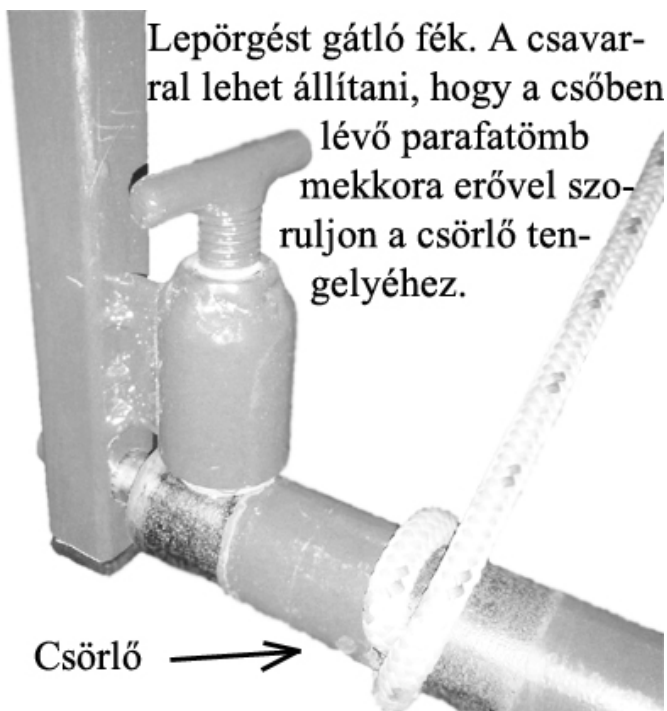

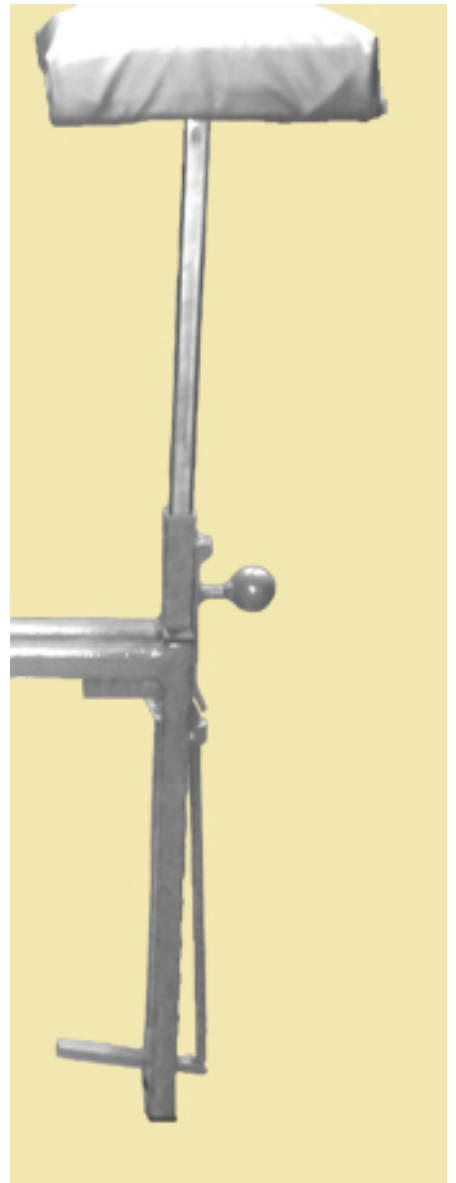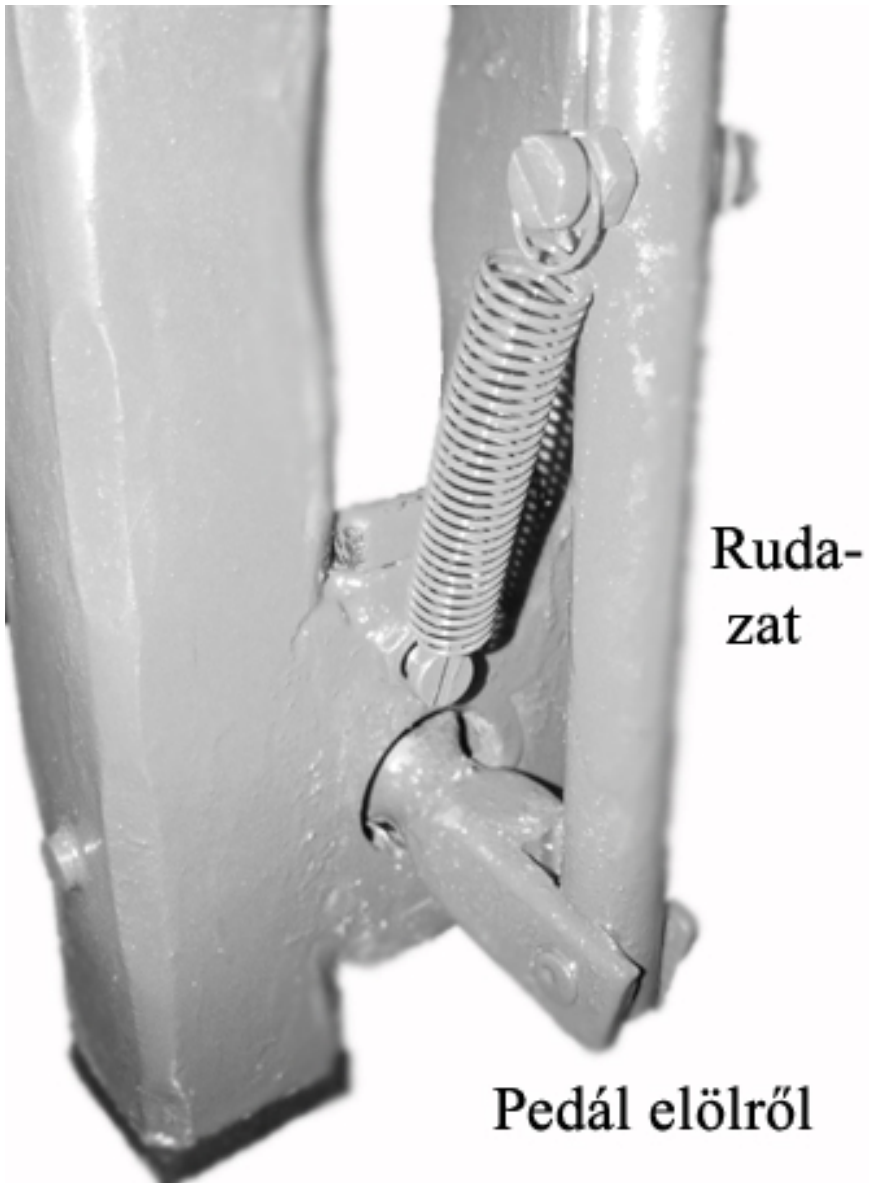

<http://kertigrille.hu>